



EQAS®


External Quality Assurance Services

BIO-RAD

Инструкция


по программам внешней оценки качества EQAS

Откройте сайт <http://www.qcnet.com/ru> и нажмите на «**Логин / Регистрация**» («**Log In / Register**») в правом верхнем углу страницы:

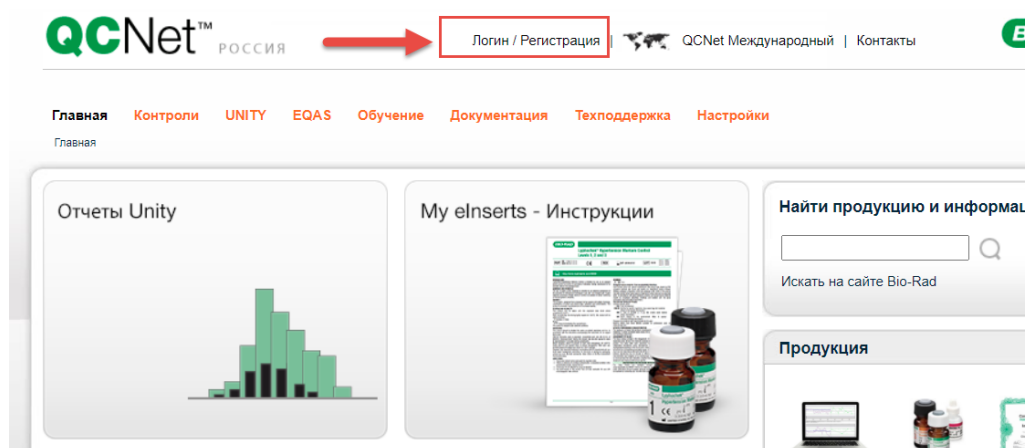

В появившемся окне введите данные Вашей учетной записи, полученные от сотрудника Bio-Rad Laboratories, и нажмите кнопку «**Вход**»:


Для работы с программами серии EQAS необходимо выбрать меню «EQAS» и далее из выпадающего списка – «Портал EQAS Online»:

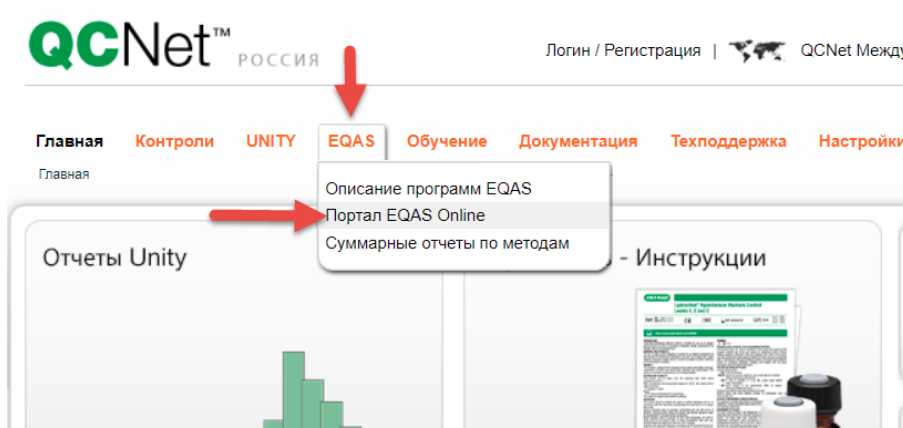

Вы попадете на главную страницу EQAS Online. Во вкладке «Лаб. №» будут отображаться наименование и идентификационный номер Вашей лаборатории в системе EQAS. Если под Вашим аккаунтом заведено несколько лабораторий (подразделений), выбрать необходимую Вы можете из выпадающего списка:

Выбрав лабораторию, настройку данных которой Вы хотите произвести, перейдите в меню «Настройка»:

EQAS Online

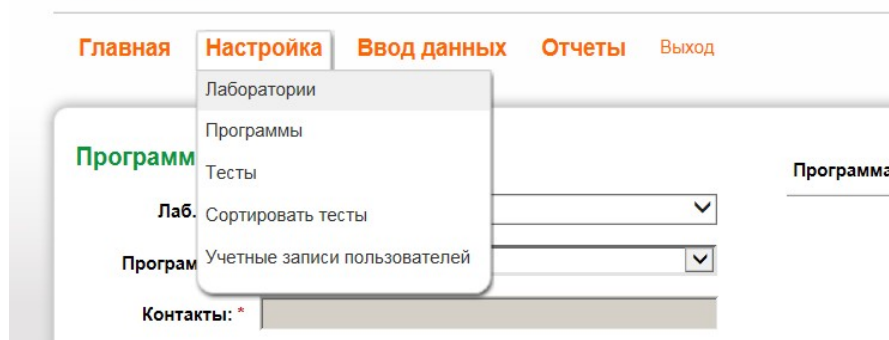

Первая вкладка данного раздела – «Лаборатории» - предназначена для внесения общих данных. Поля, отмеченные звездочками, обязательны для заполнения. Из выпадающего списка «Лаб. №» необходимо выбрать требуемую лабораторию (подразделение). Максимальное количество символов в каждой строке – 30.

После внесения всех данных нажмите кнопку «Обновить». Созданные лаборатории (подразделения) появятся справа от регистрационной формы:

Для настройки программы EQAS необходимо зайти в меню «Настройки» и выбрать «Программы», после чего появится окно с формой для заполнения:

EQAS Online

Главная Настройка Ввод данных Отчеты Выход

Авторизация: 24 июня 2016 г. 14:26

Программы

Лаб. №: *

Программа: *

Контакты: *

Отдел: *

Код страны: *

Тел: *

Факс: *

Email: *

Язык отчетов: *

Обязательное поле *

Программа

Программа "ToRCH/EBV/MuMZ" (Качественная)

Программа "ToRCH/EBV/MuMZ" (Количественная)

Программа "Биохимия мочи"

Программа "ВИЧ-Гепатиты" (Качественная)

Программа "ВИЧ-Гепатиты" (Количественная)

Программа "Газы крови"

Программа "Гематология"

Программа "Гемоглобин"

Программа "Углеродный обмен" (ежемесячная)

Программа "Кардиокардиология"

Программа "Клиническая химия" (ежемесячная)

Программа "Коагуляция"

Программа "Лекарственный мониторинг"

Программа "Питида"

Программа "Общий анализ мочи"

Программа "Определение групп крови"

Программа "Сифилис" (Качественная)

Программа "Сифилис" (Количественная)

Программа "Специфические белки"

Программа "Этанол/Аммоний"

Из выпадающего списка «Лаб.№» выберите требуемую лабораторию, из списка «Программа» - программу EQAS, в которой она участвует. Выберите русский язык отчетов.

После внесения всех данных нажмите кнопку «Добавить» в нижней части формы. Созданная Вами программа появится справа от формы. Справа от названия программы расположены значки редактирования (в виде карандаша) и удаления (крестик). При удалении программы все данные, в т.ч. по выполненным тестам, будут безвозвратно утеряны.

Программа

Программа "ToRCH/EBV/MuMZ" (Качественная)

✎ ✕

Для внесения в программу EQAS тестов, перейдите в меню «Настройки», «Тесты»:

EQAS Online

Главная Настройка Ввод данных Отчеты

Тесты

Лаборатории

Программы

Тесты

Сортировать тесты

Учетные записи пользователей

Откроется окно с регистрационной формой для тестов.


Из выпадающего списка «Лаб.№» Вы выбираете лабораторию (подразделение), в которой выполняется тест, далее – соответствующую программу EQAS. Поле «с образца» указывает номер контрольного образца EQAS, начиная с которого вступают в силу возможные изменения (например, при планируемой смене методики, реагентов и пр.). По умолчанию в данной строке остается «1».

Пожалуйста, обратите внимание на два возможных варианта настройки тестов:


1. Все тесты в выбранной Вами программе EQAS Вы выполняете с помощью широко распространенной «закрытой» автоматической системы (анализатор + «родные» реагенты). В этом случае Вы нажимаете кнопку «Установка по анализатору»:

Тесты

Появится окно, в котором Вы сможете выбрать анализатор из списка (каждой программе EQAS соответствуют свои типы анализаторов):

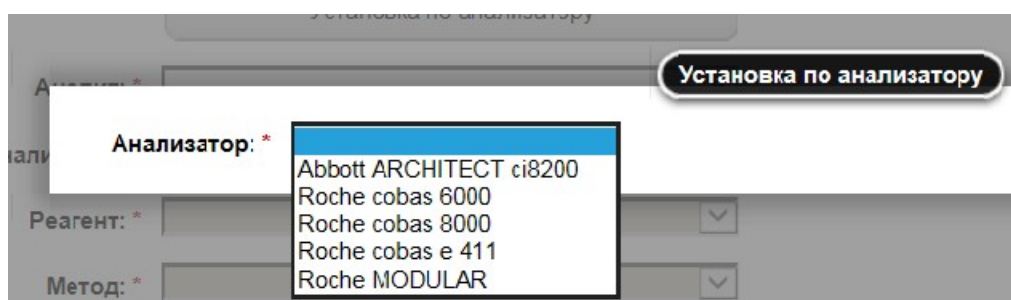

После настройки анализатора Вам будет предложено выбрать тесты из списка возможных, единицы измерения (SI – СИ, или CU – conventional units – условные единицы; актуальны для количественных методик), и сохранить изменения:

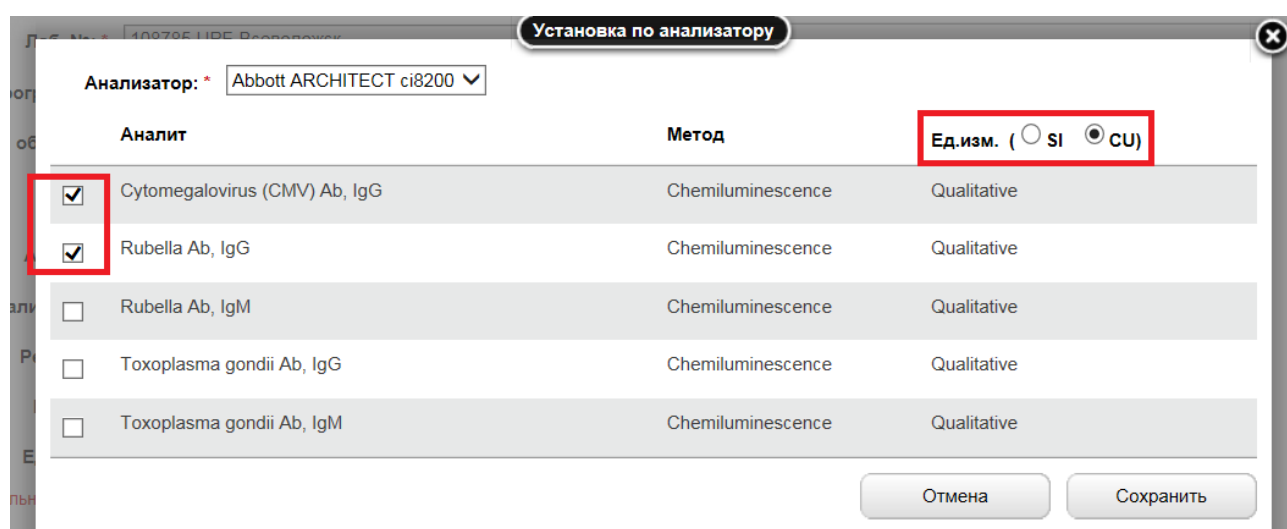

Если Вы выполняете один тест на нескольких анализаторах, после сохранения снова перейдите в форму настройки тестов и выберите другой анализатор и этот же тест из списка.

2. Если в списке «Установка по анализатору» не оказалось применяемого Вами, либо Вы проводите тесты на открытых системах, настройка тестов проводится по аналиту (т.е. по отдельности). Из выпадающего списка Вы выбираете аналит из возможных в Вашей программе EQAS:

Программа: *

С образца: *

Установка по анализатору

Аналит: *

Анализатор: *

Реагент: *

Метод: *

Ед.изм.: *

Обязательное поле *

CMV Ab, IgG
CMV Ab, IgG-Unit
CMV Ab, IgM
CMV Ab, IgM-Unit
EBNA Ab, IgG
EBNA Ab, IgG-Unit
EBV (VCA) Ab, IgG
EBV (VCA) Ab, IgG-Unit
EBV (VCA) Ab, IgM
EBV (VCA) Ab, IgM-Unit
Herpes Simplex 1 Ab, IgG
Herpes Simplex 1/2 Ab, IgG
Herpes Simplex 2 Ab, IgG
Mumps Ab, IgG
Rubella Ab, IgG
Rubella Ab, IgG-Unit
Rubella Ab, IgM
Rubella Ab, IgM-Unit
Rubeola (Measles) Ab, IgG
T. gondii Ab, IgG
T. gondii Ab, IgG-Unit
T. gondii Ab, IgM
T. gondii Ab, IgM-Unit
Varicella Zoster Ab, IgG

Далее для каждого аналита определяете анализатор (тест-систему), реагент (если Вы используете «родные» реагенты, то в поле «Реагент» следует выбрать «Dedicated»), метод и единицы измерения:

Аналит: *

Анализатор: *

Реагент: *

Метод: *

Ед.изм.: *

Отмена Add

Для более удобного поиска анализаторов и реагентов воспользуйтесь значком 🔍.

После внесения данных нажмите кнопку «Add». Созданный тест появится справа от регистрационной формы:

Тесты

Лаб. №: *

Программа: * Программа "ToRCH/EBV/MuMZ" (Количественна:)

С образца: * 1

Установка по анализатору

Аналит: *

Анализатор: *

Реагент: *

Метод: *

Ед.изм.: *

Обязательное поле *

Аналит	Анализатор	
CMV Ab, IgG	Abbott ARCHITECT c16000	 
CMV Ab, IgM	Abbott ARCHITECT i1000	 
EBNA Ab, IgG	Abbott ARCHITECT i1000	 
EBV (VCA) Ab, IgG	Abbott ARCHITECT i1000	 
EBV (VCA) Ab, IgM	Abbott ARCHITECT i1000	 

Вы можете отредактировать данные каждого теста, нажав на изображение карандаша справа от наименования, либо удалить его.

Внесение данных по контрольным образцам EQAS.

Внесение данных производится в меню «Ввод данных»:

EQAS Online

Главная Настройка Ввод данных Отчеты Выход

Авторизация:
24 июня 2016 г. 15:54

Ввод данных

Лаб. №: * Программа: * Программа "ToRCH/EBV/MuMZ" (Количественна:)


1 1 мар	2 5 апр	3 3 май	4 7 июн	5 5 июл	6 2 авг	7 6 сен	8 4 окт	9 1 ноя	10 6 дек	11 3 янв	12 7 фев
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

☐ Все результаты сохранены ☐ Пропущенные результаты ☒ Текущая проба ☐ Поздние результаты * Исправленные результаты

Аналит	Результат	UR	Дата отправки
CMV Ab, IgG	Sample/Cutoff (Index, ISR)	☐	
CMV Ab, IgM	Sample/Cutoff (Index, ISR)	☐	
EBNA Ab, IgG	Sample/Cutoff (Index, ISR)	☐	
EBV (VCA) Ab, IgG	Sample/Cutoff (Index, ISR)	☐	

Вы выбираете лабораторию и программу.

Актуальные номера проб цикла, результаты тестов по которым можно внести, выделены оранжевым («Текущая проба»).

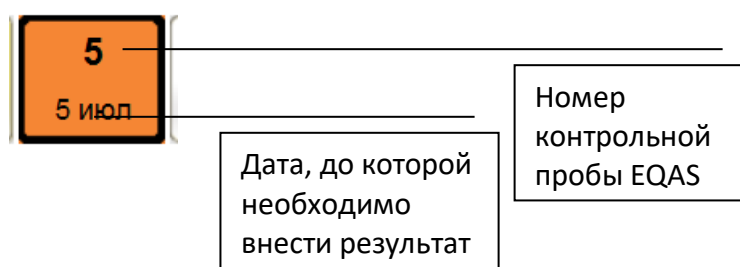

После внесения результатов тестов ячейка обозначается зеленым цветом.

Ячейки контрольных образцов, дата предоставления данных по которым не наступила, не активны (серый цвет). Ячейки с не отправленными или пропущенными значениями – жёлтые. Значения, принятые в обработку после установленной даты обозначаются значком , изменённые данные - звёздочкой.

Внесение данных проводится нажатием на активную ячейку соответствующего образца. Выводится перечень анализов (тестов), результаты измерения которых Вы вносите.

Если Вы не получили результат, напротив теста ставится галочка в поле UR (unreportable result – непубликуемый результат), и из выпадающего списка Вы выбираете причину:

Аналит	Результат	UR	Дата отправки
CMV Ab, IgG Abbott ARCHITECT c16000 Dedicated Reagent EIA Sample/Cutoff (Index, ISR)	Меньше предела обнаружения Выше диапазона тест-системы(разведение невозможно) Нулевой результат Флаг анализатора Мутный образец Недостаточный объем образца Другое		
CMV Ab, IgM			
EBNA Ab, IgG			

После внесения результаты необходимо сохранить.

Изменение цвета ячейки на зеленый означает, что данные успешно приняты.

Результаты статистической обработки будут доступны через 3-5 дней после даты, до которой необходимо было предоставить данные (т.е. даты, указанной в нижней части ячейки).

Просмотр отчетов EQAS.

Выберите лабораторию, программу, цикл и тип отчета в разделе «Мои отчеты EQAS».

EQAS Online

Главная Настройка Ввод данных Отчеты Выход

Мои Отчеты EQAS
Контрольный журнал

Мои Отчеты EQAS

➡ ☒ PDF откроется в этом же окне ☐ PDF откроется в новом окне (Рекомендуется для пользователей планшетов)

Лаб. № Программа Цикл Тип отчетов

Отчет по образцам доступен в “Sample report”, по стандартам качества – в разделе “Quality Specification Report”.

По окончании цикла программы EQAS также становится доступен итоговый годовой отчет (“End of Cycle”).

Мои Отчеты EQAS

➡ ☒ PDF откроется в этом же окне ☐ PDF откроется в новом окне (Рекомендуется для пользователей планшетов)

Лаб. № Программа Цикл Тип отчетов

После выбора необходимого отчета автоматически начнётся загрузка файла .pdf. Он также может быть сохранен и распечатан.